

C-FORM Cast Tape



C-Form Bandagen lassen sich wie reguläre Gipsbandagen handhaben und sind hervorragend anformbar

Bitte befolgen Sie diese Anweisungen Schritt für Schritt

- Nehmen Sie die Gipsrolle aus der Verpackung und tauchen Sie diese sofort in Wasser
- Stellen Sie sicher, dass die Rolle gut durchtränkt wird, indem Sie diese im Wasser mehrmals ausdrücken. Auf diese Weise wird das Harz in der Bandage gut durchfeuchtet
- Nehmen Sie die Rolle aus dem Wasser und drücken Sie diese leicht aus. Die Rolle sollte noch gut feucht sein
- Tipps:
 - 1. Rollen Sie die Bandage leicht um den zu gipsenden Bereich.
 - 2. Strecken Sie die Rolle im zweiten Durchgang etwas, die elastische Rolle sollte dies zulassen. Dies aktiviert das Harz im Material.
 - Stellen Sie sicher, dass jede Umwicklung die vorherige gut überlappt.
 - Es sollten mindestens zwei Lagen eingeplant werden, um ein gutes Resultat zu erzielen. Verwenden Sie dazu eine oder zwei Rollen, je nachdem, wie sehr Sie die Bandagen dehnen können.
 - Sobald Sie einen Temperaturanstieg bemerken, formen Sie die letztendliche Patientenform an, denn das Material beginnt nun auszuhärten.

WENN SIE DEN GIPS AUFSCHNEIDEN, VERWENDEN SIE BITTE EINE SCHARFE SCHERE ODER GIPSSCHNEIDER, UM EINER BESCHÄDIGUNG DES MATERIALS VORZUBEUGEN